



CEP
is a brand
of medi

cep

CZ


**NÁVOD K POUŽITÍ
A ÚDRŽBĚ**

SK

**NÁVOD NA POUŽITIE
A ÚDRŽBU**

NAVLÉKÁNÍ KOMPRESNÍCH PODKOLENEK

NAVLIEKANIE KOMPRESNÝCH PODKOLIENOK

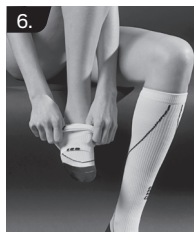

- 1.** Vložte do podkolenky ruku a uchopte prsty její patní část.
Vložte do podkolenky ruku a uchopte prsty její patní část.
- 2.** Podkolenku přetáhněte naruby, přičemž prsty stále držíte patní část.
Podkolenku pretiahnite naruby, pričom prstami stále držíte patní část.
- 3.** Vsuňte do chodidlové části podkolenky chodidlo.
Vsuňte do chodidlovej části podkolenky chodidlo.
- 4.** Dbejte na to, abyste měli chodidlovou část správně nasazenou a aby patní část ponožky přesně překrývala patu.
Dbajte o to, aby ste mali chodidlovú časť správne nasadenú a aby päťová časť ponožky presne prekryvala päťu.
- 5.** Uchopte podkolenky oběma rukama.
Uchopte podkolenky oboma rukami.
- 6.** Začněte podkolenky postupně přetahovat přes patu.
Začnite podkolenky postupne pretahovať cez päťu.
- 7.** Usaďte podkolenku pohodlně a přesně v celé chodidlové části (od špiče až po patu).
Uložte podkolenku pohodlne a presne v celej chodidlovej části (od špičky až po päťu).
- 8.** Podkolenku následně povytáhněte přes lýtko.
Podkolenku následne povytiahnite cez lýtko.
- 9.** Podkolenku rovnoměrně upravte a zajistěte její pohodlně a přesné padnutí přes lýtko. Dbejte na to, aby byla podkolenka hladká a aby na ní nebyly žádné záhyby. Neshrnujte její lem.
Podkolenku rovnomerne upravte a zaistite jej pohodlne a presné padnutie cez lýtko. Dbajte o to, aby bola podkolenka hladká a aby na nej neboli žiadne záhyby. Nezhŕňajte jej lem.

KOMPRESNÍ PODKOLENKY / PONOŽKY / NÁVLEKY / PAŽNÍ NÁVLEKY / KOMPRESNÍ KALHOTY RECOVERY PRO

Všechny produkty CEP musí být prány opatrným způsobem, aby se ochránila jejich vlákna (a uchovaly se tak jejich charakteristické vlastnosti zvyšující výkonnost) a aby byl zaručen dokonalý pocit pohodlí při opětovném nošení.

DODRŽUJTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ:

- perte Vaše kompresní podkolenky a ponožky CEP po každém použití
- šetrné praní v pračce
- nepoužívejte bělidla
- lze sušit při nízkých teplotách v bubnové sušičce
- nikdy nesaňte na přímém slunci nebo na radiátoru
- výrobek nelze žehlit
- výrobek nelze chemicky čistit



CEP doporučuje používání šetrných pracích prostředků.

KOMPRESNÍ PODKOLENKY, PONOŽKY A NÁVLEKY ULTRALIGHT A ULTRALIGHT PRO / KOMPRESNÍ A FUNKČNÍ OBLEČENÍ A DOPLŇKY / PRODUKTY S MERINO VLNOU / SPORTOVNÍ BANDÁŽE

Všechny produkty CEP musí být prány opatrným způsobem, aby se ochránila jejich vlákna (a uchovaly se tak jejich charakteristické vlastnosti zvyšující výkonnost) a aby byl zaručen dokonalý pocit pohodlí při opětovném nošení.

DODRŽUJTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ:

- perte Vaše kompresní oblečení CEP po každém použití
- šetrné praní v pračce
- nepoužívejte bělidla
- nelze sušit v bubnové sušičce
- nikdy nesaňte na přímém slunci nebo na radiátoru
- výrobek nelze žehlit
- výrobek nelze chemicky čistit



CEP doporučuje používání šetrných pracích prostředků.

SK

KOMPRESÍVNE PODKOLIENKY / PONOŽKY / NÁVLEKY / RAMENNÉ NÁVLEKY / KOMPRESNÉ NOHAVICE RECOVERY PRO

Všetky produkty CEP musia byť prané opatrným spôsobom, aby sa ochránili ich vlákna (a uchovali sa tak ich charakteristické vlastnosti zvyšujúce výkonnosť) a aby bol zaručený dokonalý pocit pohodlia pri opätovnom nosení.

DODRŽUJTE PROSÍM NASLEDUJÚCE:

- perte Vaše kompresívne podkolenky a ponožky CEP po každom použití
- šetrné pranie v pračke
- nepoužívajte bielidlá
- sušiť iba pri nízkych teplotách v bubnovej sušičke
- nikdy nesaďte na priamom slnku alebo na radiátore
- výrobok nežeľtiť
- výrobok nečistiť chemicky



CEP odporúča používanie šetrných pracích prostriedkov.

SK

KOMPRESNÉ PODKOLIENKY, PONOŽKY A NÁVLEKY ULTRALIGHT A ULTRALIGHT PRO / KOMPRESNÉ A FUNKČNÉ OBLEČENIE A DOPLNKY / PRODUKTY S MERINO VLNOU / ŠPORTOVÉ BANDÁŽE

Všetky produkty CEP musia byť prané opatrným spôsobom, aby sa ochránili ich vlákna (a uchovali sa tak ich charakteristické vlastnosti zvyšujúce výkonnosť) a aby bol zaručený dokonalý pocit pohodlia pri opätovnom nosení.

DODRŽUJTE PROSÍM NASLEDUJÚCE:

- perte Vaše kompresívne oblečenie CEP po každom použití
- šetrné pranie v pračke
- nepoužívajte bielidlá
- nesušte v bubnovej sušičke
- nikdy nesušte na priamom slnku alebo na radiátore
- výrobok nežehliť
- výrobok nečistiť chemicky



CEP odporúča používanie šetrných pracích prostriedkov.

Distributor pro Českou republiku a Slovensko:

MAXIS a.s.

Slezská 2127/13

120 00 Praha 2



cepsports.cz



cepsports.sk